




Schaftkomfort

Blatchford 

Auswahlschema


Kniekappe

Für die Kniekappe bitte 10cm oberhalb der Patella Maß nehmen.

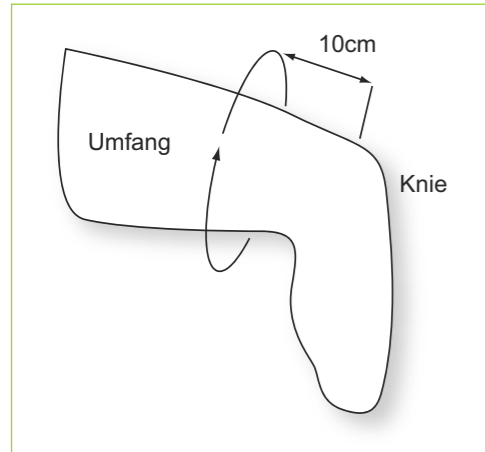

Liner

Der Linerumfang wird 4 cm über dem distalen Ende des Stumpfes gemessen.

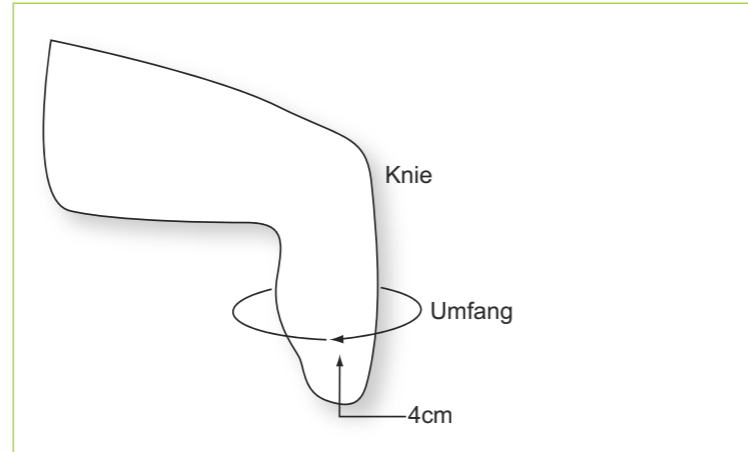

Silcare Breathe Cushion Liner



Silcare Breathe PIN Liner



Die patentierte Technologie der Silcare Breathe Silikonliner zeichnen sich durch eine speziell entwickelte, lasergebohrte Perforation aus. Luft und Schweiß können durch speziell geformte Löcher entweichen, was normalerweise zwischen Liner und Haut eingeschlossen bleibt. So können negative Auswirkungen durch ungewünschte Hub- und Scheuerbewegungen, wie bei Standardlinern üblich sein kann, reduziert werden. Durch die Bewegungen beim Gehen wird Luft durch den erzeugten Druck ausgestoßen. Dieses Procedere sorgt für trockenere Haut und ein gesünderes Stumpfklima. Schädliche Einflüsse auf den Stumpf durch ungewünschte Rutschbewegungen und Reibung reduzieren sich. Der Komfort im Schaft und die Prothesenkontrolle werden verbessert.

- Lasere-Perforation**
 Dank patentierter Laser-Perforation sind die Poren in optimaler Größe gleichmäßig der Länge nach bis zum distalen Ende des Liners angeordnet und sorgen dafür, dass Luft und Feuchtigkeit entweichen können.
- Tendresse™ Silikonbeschichtung**
 Die Tendresse™ Silikonbeschichtung sorgt für eine geringere Reibung und reduziert die Scherkräfte auf der Haut. In Tests wurden 78% weniger als bei standardmäßigem Silikon gemessen.

Amputationshöhe: Unterschenkel
Mobilitätsklasse: 3, 4
Garantie: 6 Monate

- Nahtloser Textilüberzug mit bidirektionaler Dehnung für besseren Tragekomfort und Konturierung. Scherkräfte am Knie werden während der Flexion reduziert
- Das Ausstoßventil sorgt für besseres Vakuum und optimalen Prothesensitz

Bestellcode:
SBTTCPXXL Silcare Breathe Cushion
 XX zeigt die Linergröße an, siehe Größentabelle und Zeichnung für Details

Größentabelle - Der Linerumfang wird 4 cm über dem distalen Ende des Stumpfes gemessen

*Bei exakter Messung, wählen Sie die nächst kleinere Größe aus

Gemessene Größe (cm)	Bestellcode	Beschreibung
22cm	SBTTCP22L	Silcare Breathe 22
23.5cm	SBTTCP23L	Silcare Breathe 23.5*
25cm	SBTTCP25L	Silcare Breathe 25
26.5cm	SBTTCP26L	Silcare Breathe 26.5*
28cm	SBTTCP28L	Silcare Breathe 28
30cm	SBTTCP30L	Silcare Breathe 30
32cm	SBTTCP32L	Silcare Breathe 32
34cm	SBTTCP34L	Silcare Breathe 34
36cm	SBTTCP36L	Silcare Breathe 36
40cm	SBTTCP40L	Silcare Breathe 40

Amputationshöhe: Unterschenkel
Mobilitätsklasse: 3, 4
Garantie: 6 Monate

- Unidirektionale Dehnung am distalen Ende widersteht Rotations- und Hubbewegungen, während die bidirektionale Dehnung am proximalen Ende eine komfortable Knieflexion ermöglicht
- Die Einwege-Ventilkappe in Kombination mit einem Verriegelungssystem schaffen eine luftdichte Haftung zwischen Haut und Linerinnenfläche. Es ist keine zusätzliche Kniekappe erforderlich, was zu einer kühleren Umgebung für die Haut und einer sicheren Stumpf- und Schaftverbindung beiträgt

Bestellcode:
SBTTLPXXL Silcare Breathe PIN
 XX zeigt die Linergröße an, siehe Größentabelle und Zeichnung für Details

Größentabelle - Der Linerumfang wird 4 cm über dem distalen Ende des Stumpfes gemessen

*Bei exakter Messung, wählen Sie die nächst kleinere Größe aus

Gemessene Größe (cm)	Bestellcode	Beschreibung
22cm	SBTTLP22L	Silcare Breathe PIN 22
23.5cm	SBTTLP23L	Silcare Breathe PIN 23.5*
25cm	SBTTLP25L	Silcare Breathe PIN 25
26.5cm	SBTTLP26L	Silcare Breathe PIN 26.5*
28cm	SBTTLP28L	Silcare Breathe PIN 28
30cm	SBTTLP30L	Silcare Breathe PIN 30
32cm	SBTTLP32L	Silcare Breathe PIN 32
34cm	SBTTLP34L	Silcare Breathe PIN 34
36cm	SBTTLP36L	Silcare Breathe PIN 36
40cm	SBTTLP40L	Silcare Breathe PIN 40

*Hinweis- 23.5 = SBTTLP23L , 26.5 = SBTTLP26L

Silikonliner

Comfort Cushion Liner



Comfort PIN Liner



Der Blatchford Comfort Liner schützt empfindliche Haut und schützt den Stumpf in Bereichen, die für Scherkräfteabrieb und Druckspitzen anfällig sind. Der Texturüberzug mit integrierter Matrix ermöglicht dank bidirektionaler Dehnung eine komfortable Knieflexion, widersteht jedoch der distalen Dehnung für sicheren Halt zwischen Stumpf und Prothese. Die Option zwischen Comfort Cushion Liner und Comfort PIN Liner ermöglichen die ideale Auswahl für das passende Anschluss-System.

- Integrierte Matrix**
 Der technisch gestrickte Texturüberzug des Comfort PIN Liners verfügt über eine integrierte distale Matrix mit unidirektionaler Dehnung zur Hubminimierung. Die nahtlose Stricktechnologie ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen bidirektionaler und unidirektionaler Dehnungszone.
- Dehnungszonen**
 Der nahtlose Textilüberzug mit bidirektionaler Dehnung verbessert den Tragekomfort und Konturierung. Scherkräfte am Knie werden während der Flexion reduziert.
- Flexible Linertasse**
 Der Comfort PIN Liner verfügt über eine besonders flexible Linertasse und lässt sich leicht umdrehen, um ein optimales Anziehen zu erleichtern.
- Tendresse™ Silikonbeschichtung**
 Die Tendresse™ Silikonbeschichtung sorgt für eine geringere Reibung und reduziert die Scherkräfte auf der Haut. In Tests wurden 78%[†] weniger als bei standardmäßigem Silikon gemessen.

Amputationshöhe: Unterschenkel
Mobilitätsklasse: niedrig bis mittlere Aktivität
Garantie: 6 Monate

Amputationshöhe: Unterschenkel
Mobilitätsklasse: niedrig bis mittlere Aktivität
Garantie: 6 Monate

Bestellcode:
 CTTCPXXL Blatchford Comfort Cushion
 XX zeigt die Linergröße an, siehe Größentabelle und Zeichnung für Details

Bestellcode:
 CTTLPXXL Blatchford Comfort PIN
 XX zeigt die Linergröße an, siehe Größentabelle und Zeichnung für Details

Größentabelle - Der Linerumfang wird 4 cm über dem distalen Ende des Stumpfes gemessen

*Bei exakter Messung, wählen Sie die nächst kleinere Größe aus

Gemessene Größe (cm)	Bestellcode	Beschreibung
22cm	CTTCP22L	Comfort Cushion 22
23.5cm	CTTCP23L	Comfort Cushion 23.5*
25cm	CTTCP25L	Comfort Cushion 25
26.5cm	CTTCP26L	Comfort Cushion 26.5*
28cm	CTTCP28L	Comfort Cushion 28
30cm	CTTCP30L	Comfort Cushion 30
32cm	CTTCP32L	Comfort Cushion 32
34cm	CTTCP34L	Comfort Cushion 34
36cm	CTTCP36L	Comfort Cushion 36
40cm	CTTCP40L	Comfort Cushion 40

Größentabelle - Der Linerumfang wird 4 cm über dem distalen Ende des Stumpfes gemessen

*Bei exakter Messung, wählen Sie die nächst kleinere Größe aus

Gemessene Größe (cm)	Bestellcode	Beschreibung
22cm	CTTLP22L	Comfort PIN 22
23.5cm	CTTLP23L	Comfort PIN 23.5*
25cm	CTTLP25L	Comfort PIN 25
26.5cm	CTTLP26L	Comfort PIN 26.5*
28cm	CTTLP28L	Comfort PIN 28
30cm	CTTLP30L	Comfort PIN 30
32cm	CTTLP32L	Comfort PIN 32
34cm	CTTLP34L	Comfort PIN 34
36cm	CTTLP36L	Comfort PIN 36
40cm	CTTLP40L	Comfort PIN 40

*Hinweis- 23.5 = CTTCP23L, 26.5 = CTTCP26L
[†]Die Referenzen finden Sie auf unserer Website www.blatchford.de

Silcare Breathe PIN Liner Ersatzteile/ Zubehör

Ventil-Kit



Bestellcode	Größe
559015	Small (Größe 22, 23.5, 25cm)
559016	Medium (Größe 26.5, 28cm)
559017	Large (Größe 30, 32, 34cm)
559018	Extra Large (Größe 36, 40cm)

Abformdummy



Bestellcode
 599019

Gel-Kniekappe

Flex Sleeve - SFX



Die Flex Sleeve (SFX) Kniekappe kombiniert ein nahtloses Strickgewebe mit dem HD Gel für besonders hohen Tragekomfort. Dank einer 30° Vorflexion ist eine leichte Kniebeugung möglich und die Faltenbildung im Kniekehlenbereich reduziert.

- 30° Vorflexion
- High Density Gel (HD Gel) sorgt für maximale Kontrolle, auch bei aktiven Anwendern
- in 3mm Wandstärke erhältlich
- eine Länge ist für die meisten Anwender geeignet
- 3 Monate Garantie

Bestellcode:
 SFXXX -3G Flex Sleeve – SFX, 3mm
 XX zeigt die Größe an, siehe Größentabelle und Zeichnung für Details

Größentabelle - Für die Kniekappe bitte 10cm oberhalb der Patella Maß nehmen

Gemessene Größe (cm)	3mm
Größe 20-24cm	SFX20-3G
Größe 31-40cm	SFX26-3G
Größe 35-60cm	SFX32-3G

Ventile und Zubehör

Bestellcode:
Schaft-
schluss-Set*
409663

*Für EchelonVAC



Rückschlag-
ventil
Service Set
409863

*Für EchelonVAC



Rückschlag-
ventil*
409763

*Für EchelonVAC



Lyn Valve BK2 Einweg-
Ausstoßventilkopf (metrisch)
929052



Lyn Valve Gehäuse mit
Innengewinde (metrisch)
929053



Vac Barb 90° Winkelstück
929055 *Für EchelonVAC



Rückschlagventil
929054 *Für EchelonVAC



Einlassfilter
929051 *Für EchelonVAC



Aria Hybrid Ventil
929062



Vakuumschlauch Länge: 1m
905464



Lyn Valve® RV Kit - Automatik
PA0002 Schaftventil mit automatischem Ausstoss



Lyn Valve® RV Kit - Manuell
PA0300 Schaftventil mit manuellem Ausstoss



Lyn Valve® RV Slide
PA0400 Schaftventil mit automatischem Ausstoss und schiebbarer Betätigung



Schaftverriegelung



- robuste Schaftverriegelung für Silikon- und Gelliner
- manuelles Einrasten mit akustischer Rückmeldung für den Anwender
- kann laminiert oder thermogeformt werden

Bestellcode:

109108 Verschlussstück für flexible Innenschäfte inkl. Pin M10 Rastzapfen

109308 Rastzapfenpin mit M10 Anschluss für 109108

Schaftventile



Bestellcode:

Oberschenkelschaft-Saugventil-Set:
099132 Standard 19mm Durchmesser
099134 Groß 24mm Durchmesser

Oberschenkelschaft-Ventil für flexible Innenschäfte:
099135 Groß 24mm Durchmesser

Weltweite Garantieerklärung

Die Blatchford Group gewährleistet für einen Zeitraum, dass ihre Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehler sind. Die Garantiezeit beginnt, soweit nicht anders angegeben, mit dem Datum des Produktversands.

Wenn während der Garantiezeit ein Defekt festgestellt wird, wird Blatchford nach eigenem Ermessen das defekte Teil reparieren oder gegen ein entsprechendes Ersatzteil austauschen, oder den Kaufpreis der defekten Komponente erstatten. Die Garantiedauer des reparierten oder ausgetauschten Teils ist auf die verbleibende Garantiezeit des Produkts begrenzt.

Die Garantie deckt nur die angefallenen Kosten für die defekte Komponente ab und schließt alle anderen damit in Verbindung stehenden Kosten aus. „Andere damit in Verbindung stehende Kosten“ sind unter anderem weitere Produktteile, Kosten für das Montieren und Demontieren, Transportkosten, Reisekosten, Arbeitszeit und jegliche weitere Form von Ausgleichszahlungen.

Die Garantie schließt Defekte aus, die durch unsachgemäße Nutzung, Beschädigungen durch Unfälle, Nachlässigkeit, Verschleiß, unzulässige Produktmodifikationen, durch falschen Zusammenbau, und, sofern nicht zulässig, durch Eintauchen in Wasser, entstanden sind. Bestimmte Nutzungseinschränkungen, die in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben sind, müssen eingehalten werden.

Blatchford gewährt keine abweichenden Garantiebedingungen oder Vereinbarungen, ob schriftlich oder mündlich, soweit nach geltendem Recht zulässig. Jede stillschweigende Garantie oder Marktüblichkeit, zufriedenstellende Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, wird hiermit ausgeschlossen. Einige Länder, Bundesländer oder Regionen erlauben keine Einschränkungen auf die Dauer einer impliziten Garantie. In diesem Falle hat die obige Ausschlussklärung auf diese Regionen keine Anwendung. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte, die je nach Land, Bundesland oder Region variieren können.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, sind die Rechtsbehelfe in dieser Garantiebestimmung exklusiv für Sie bestimmt. Außer wie oben angegeben, haftet Blatchford oder seine Lieferanten nicht für direkte, spezielle, Neben-, Folge- oder andere Schäden, egal ob aus Vertrag, Schadensersatz oder auf andere Weise. Einige Länder, Bundesländer oder Regionen erlauben keinen Haftungsausschluss für Neben- oder Folgeschäden. In diesem Falle hat die obige Erklärung auf diese Regionen keine Anwendung.

Wenn das Produkt mit einem Garantieschein ausgeliefert wird, muss dieser ausgefüllt und an das Unternehmen zurückgesendet werden, damit die Garantie wirksam ist.

Für Garantieansprüche muss das defekte Produkt, soweit dies von Blatchford verlangt wird, mit vollständig ausgefülltem Rücksendeformular eingeschickt werden.

Für Produktrücksendungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantieerklärung Änderungen unterliegt; unsere aktuelle Garantieerklärung wird auf unserer Webseite veröffentlicht



Es wird eine jährliche Sichtprüfung empfohlen. Überprüfen Sie optische Mängel, die eine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bevor Sie neue Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Orthopädietechniker, ob ein spezielles Training erforderlich ist.

+49 9221 87808 0 | info@blatchford.de
Blatchford Europe GmbH, Fritz-Hornschuch-Str. 9,
95326 Kulmbach, Germany.

[@blatchfordDE](https://www.blatchford.de) | [blatchford.de](https://www.blatchford.de)

203266198 Iss1 11/20. Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Blatchford 